

# TEBORI

<b>NOME COMERCIAL</b>	Indutor Manual para Dermopigmentação - Tebori
<b>MODELO COMERCIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tebori</li></ul> 

## FORMA DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL

O indutor é vendido em embalagem plástica com rótulo. Não esterilizado.

## INDICAÇÃO DE USO

Agulhas para a execução do procedimento de maquiagem definitiva (dermopigmentação), dipostas de forma que permitem a implantação manual do pigmento, fio por fio, formando assim o design das sobrancelhas naturais e sem excessos.

## MODO DE USO

Retirar a agulha da embalagem e conectá-la ao Tebori pelo sistema de rosca.

<b>Prazo de validade</b>	Indeterminado
<b>Condições de armazenamento</b>	Temperatura Ambiente
<b>Condições de transporte</b>	Temperatura Ambiente

## CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Deve-se lavar as mãos antes e após o atendimento do cliente com água e sabonete antisséptico, seguido de aplicação de álcool a 70%, utilizar luvas para realização do procedimento. Após o uso, a agulha deve ser descartada em descartpack.

## **ADVERTÊNCIAS**

Se a pele estiver lesionada ou ferida, não deve realizar a dermopigmentação (maquiagem definitiva) ou tatuagem.

Interromper o uso do produto, em caso de irritação durante o procedimento, e procurar orientação médica.

## **PRECAUÇÕES**

Não deve usar o produto se a embalagem estiver violada.

Não usar o produto com o prazo de validade vencido

Manter fora do alcance de crianças.

## **CONTRA INDICAÇÕES**

Para portadores de diabetes, hemofilia, câncer de pele, herpes labial, alergias tópicas, urticária física (dermografismo), portadores de marca-passo, grávidas e para quem tem propensão a desenvolver quelóides (neste caso fazer teste)

## **EFEITOS ADVERSOS**

Após o procedimento, nos três primeiros dias, é possível a formação de uma crosta sobre a região.

Não retirar a crosta, que vai servir de curativo biológico e manter a coloração íntegra.

## **NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DO MESMO**

Não Aplicável